

# ZOE Remover

## Solvente per cementi eugenati

CE  
0123

### 1. **COMPOSIZIONE**

Miscela di idrocarburi aromatici ed eccipienti q.b.

### 2. **PROPRIETA'**

Il prodotto ha una spiccata attività solvente verso i cementi endodontici a base di zinco ossido/eugenolo (ZOE) e verso la guttaperca.

A differenza di altri solventi già in commercio utilizzati per questi campi applicativi, ZOE Remover contiene sostanze caratterizzate da una bassa tossicità ed agisce in pochi minuti, assicurando così una minimizzazione del rischio chimico sia per il medico che per il paziente.

### 3. **INDICAZIONI**

Coadiuvante nella rimozione di chiusure apicali a base di cementi endodontici eugenati con o senza guttaperca.

### 4. **MODALITA' D'USO**

Il dente deve essere perfettamente isolato mediante l'utilizzo di una diga.

Dopo aver pulito meccanicamente la camera e i canali, introdurre una goccia di prodotto e continuare la fase di strumentazione, avendo cura di mantenere la punta degli strumenti bagnata col prodotto. Continuare a più riprese fino al raggiungimento dell'apice.

### 5. **RISCHI**

Il prodotto è nocivo per ingestione ed inalazione: evitare di lasciare il flacone aperto in ambiente non aerato.

### 6. **PRECAUZIONI**

Usare guanti protettivi ed occhiali.

### 7. **AVVERTENZE**

Xn – prodotto nocivo

Inflammabile

Tenere fuori della portata dei bambini.

Non disperdere la confezione nell'ambiente dopo l'uso.

Non utilizzare dopo la scadenza riportata sulla confezione.

### 8. **CONSERVAZIONE**

Conservare il flacone ben chiuso lontano da fonti di calore.

### 9. **PRESENTAZIONE**

Flacone da 15 g con micropipetta dosatrice.

### 10. **REGIME DI UTILIZZO**

Dispositivo medico ad esclusivo uso degli specialisti in odontoiatria e stomatologia

Cod. 1057

Rev.0 del 09-2011

OGNA Laboratori Farmaceutici  
Via Figini, 41 – 20053 Muggiò (MI)  
Divisione Odontoiatrica – tel. 039/2782954- fax 039/2782958  
Web: [www.ognalaboratori.it](http://www.ognalaboratori.it)