

PRODONTO GUANTI DENTAL TOUCH POWDER FREE			
Documento NIM – DTPF/006	Data: 21/08/2018	Edizione: 06-08-18	Pag.: 1/3

Denominazione prodotto	PRODONTO GUANTI DENTAL TOUCH POWDER FREE	
Fabbricante	ICOGUANTI S.p.A. C.so Carbonara 10A/1 16125 Genova Italia	
Codice commerciale	DTPF	
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) <i>ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008</i>	Codice n. T010201	
Numero di repertorio	XS	93212/R
	S	513358/R
	M	513360/R
	L	513365/R
Destinazione d'uso	Guanti, medicali, da esame, monouso, non sterili in lattice. Il prodotto è da considerarsi in Classe I ^a secondo l'Allegato IX del D.Lgs. n. 46/97(<i>in attuazione Direttiva CEE 93/42</i>) emendato col D. Lgs. 25.01.2010 n° 37 (<i>recepimento Direttiva 2007/47/CE</i>) in quanto dispositivo invasivo ad uso temporaneo in relazione agli orifizi del corpo (<i>Allegato IX – Comma III – Punto 2.1 - Regola 5</i>).	
Attestazione CE	Allegato VII Direttiva 93/42/CEE s.m. i.	
Ente emittente	ICOGUANTI S.p.A.	

1 Descrizione prodotto e sue varianti

Guanto medicale monouso da esame non sterile, a base di lattice naturale sottoposto a processo a "polymer coating". Senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida.

Taglie disponibili	XS / 5-5,5	S / 6-6,5	M / 7-7,5	L / 8-8,5
--------------------	------------	-----------	-----------	-----------

2 Conformità

- Conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 93/42/CEE (D. Lgs. 46/97) e succ. mod.
- Conforme alle Norme UNI EN 455 1-2-3 ed UNI EN ISO 10993-1, armonizzate per la Direttiva 93/42/CEE e succ. mod.
- Materie prime e processo produttivo conformi agli standard della FDA (Food and Drug Administration) e del GMP (Good Manufacturing Practice) USA.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016.

3 Caratteristiche prestazionali

AQL 1.5 (Livello G 1) per assenza di fori e maggiori difettosità, AQL 1,5 (Livello G 1) per minori difettosità, AQL 4 (Livello S2) per dimensioni fisiche e proprietà, con riferimento alle norme ASTM D 3578.

4 Caratteristiche fisiche

Colore	Ambra		
Dimensioni (mm)	Taglia	Lunghezza (min)	Larghezza (± 5)
	XS / 5-5,5	240	77
	S / 6-6,5	240	85
	M / 7-7,5	240	96
	L / 8-8,5	240	110

PRODONTO GUANTI DENTAL TOUCH POWDER FREE

Documento NIM – DTPF/006	Data: 21/08/2018	Edizione: 06-08-18	Pag.: 2/3
--------------------------	------------------	--------------------	-----------

Spessore (mm)	Palmo	0,15 (± 0,03)
Carico di rottura (UNI EN 455-2:2010) (N)	Prima invecchiamento	9 (min)
	Dopo invecchiamento (dopo 7 giorni alla Temp. = 70 ± 2°C)	6 (min)

5 Packaging

5.1. Dispenser box con 100 guanti “contati a peso” (*by weight*).

5.2. Guanti confezionati in dispenser-box da 100 guanti.

Dimensioni dispenser-box (mm)	240 X 120 X 80	Peso 65 (g) (<i>Valori nominali</i>)
-------------------------------	----------------	--

5.3. Cartoni da 10 dispensers-boxes.

Dimensioni cartone (mm)	460X 250 X 250	Peso 500 (g) (<i>Valori nominali</i>)
-------------------------	----------------	---

6 Avvertenze

6.1 Prodotto contenente lattice di gomma naturale: può causare in soggetti sensibili patologie allergico / irritative con quadri clinici anche gravi in soggetti a rischio.

6.2 I guanti contengono componenti potenzialmente allergizzanti in soggetti sensibili che possono causare irritazione e/o reazioni allergiche. Qualora si verifici una manifestazione allergica consultare immediatamente il medico.

6.3 Non utilizzare i guanti quando sussiste il rischio di impigliarsi in parti di macchine in movimento.

6.1 Guanto monouso: l'eventuale pulizia e/o risterilizzazione può danneggiare il guanto, con il conseguente rischio di perforazioni e lacerazioni durante il riutilizzo.

6.4 Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.

6.5 Controllare la data di scadenza sulla confezione.

6.6 Tenere lontano dalla portata dei bambini.

7. Istruzioni per l'uso

7.1 Scegliere la taglia

7.2 Verificare la data di scadenza

7.3 Controllare l'integrità del dispositivo.

7.4 Indossare i guanti con cautela con le mani asciutte e pulite

7.5 Rimuovere un guanto partendo dal polsino, tenerlo nella mano rimasta guantata, con la mano libera rimuovere il secondo guanto prendendolo dall'interno ed infilare il primo guanto all'interno del secondo.

7.6 Smaltire in conformità alle normative vigenti sulla base delle informazioni contenute nella presente nota informativa.

7.7 Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.

7.8 ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard della stessa, alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è consentito dalla legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia, comprese eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si limita al rimborso del prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del prodotto accettano i termini di queste limitazioni della garanzia, termini che non possono essere alterati da qualsiasi accordo scritto o orale.

7.9 Periodo di validità 3 anni dalla data di produzione se conservati in luogo fresco ed asciutto.

8 Raccomandazioni

8.1 Sostituire con frequentemente con regolarità.

8.2 Lavare le mani dopo l'uso.

8.3 Se usati con molta frequenza utilizzare prodotti stabilizzanti il pH della pelle.

PRODONTO GUANTI DENTAL TOUCH POWDER FREE

Documento NIM – DTPF/006

Data: 21/08/2018

Edizione: 06-08-18

Pag.: 3/3

9 Trasporto e stoccaggio

- 9.1 Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore.
- 9.2 Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco ed asciutto, in quanto un'errata conservazione può causare problemi di calzata temporanei e reversibili che vengono eliminati ponendo i guanti in un luogo asciutto.